


MEDLINE

Ultrasorbs® AP


APPLICATION GUIDE

GUÍA DE APLICACIÓN

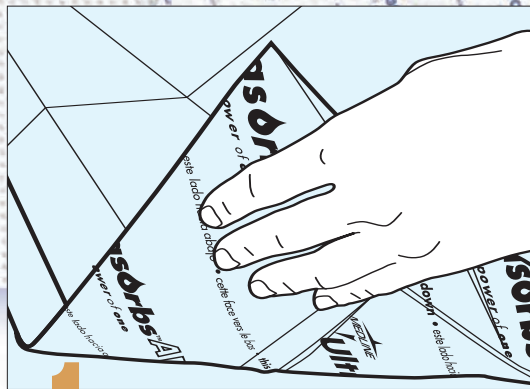


1 Unfold the pad and place it on the bed with the printed side down.

Desdoble el protector y colóquelo sobre la cama, con el lado estampado hacia abajo.

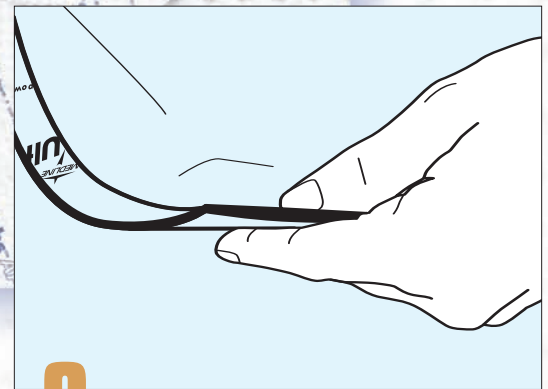

2 Use only one pad at a time to prevent pressure buildup. Do not layer or stack multiple pads.

Use solamente un protector a la vez para evitar la acumulación de presión. No ponga varias capas de protectores ni los apile.

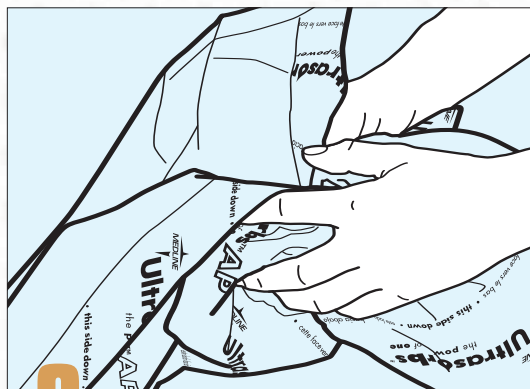

3 Once soiled, remove and replace the pad with a new underpad.

Cuando se ensucie el protector, quítelo y ponga uno nuevo.

CAUTION: Only one Ultrasorbs AP pad is needed per use. Use of multiple pads can increase skin pressure.

PRECAUCIÓN: Solamente se requiere un solo protector Ultrasorbs AP por uso. El empleo de varios protectores puede aumentar la presión sobre la piel.



Overnight
Para toda la noche



Ultrasorbs® AP

TROUBLESHOOTING GUIDE

GUÍA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES POSIBLES

PROBLEM

Leakage

SOLUTION

Center the product under the patient, both horizontally and vertically.

Ensure that the printed side of the product is facing down toward the bed.

In-service staff on appropriate product use.

Tearing

Ensure that the product is not being used for patient lifting or transporting.

PROBLEMA

Escape de líquido

SOLUCIÓN

Centre el producto debajo del paciente tanto en sentido vertical como horizontal.

Verifique que el lado estampado del producto está hacia abajo, tocando el colchón.

Instruya al personal cómo usar el producto adecuadamente.

Rasgaduras

Verifique que el producto no se esté utilizando para levantar ni transportar al paciente.



1-800-MEDLINE (633-5463)

www.medline.com

©2007 Medline Industries, Inc.
Medline and Ultrasorbs are registered trademarks of
Medline Industries, Inc.

We reserve the right to correct any errors that may occur within this guide.

Medline Canada 1-800-396-6996

www.medline.ca | canada@medline.com

Not all products are currently available for sale in Canada.
Please contact your Account Representative for additional information.