

DYNDE70840 – MediClip Chirurgischer Haarschneider

AUFLADEN

SCHRITT Inbetriebnahme

- Der MediClip Haarschneider ist bei Lieferung geladen. Es wird jedoch empfohlen, ihn vor dem ersten Gebrauch 10 Stunden lang zu laden.

Aufladen

Den Haarschneider bei Nichtnutzung oder nach jedem Gebrauch auf die Aufladestation stellen. Der MediClip kann nicht überladen werden. 10-stündiges Aufladen bietet eine 60-minütige Laufzeit.



AUSWAHL DER KLINGE

SCHRITT **DYND70845**: Zur Anwendung bei rauem Haar, etwa in der Neurochirurgie. (Grün)

- DYND70850**: Für die meisten Anwendungen am Körper, einschließlich Leisten- und Brustbereich. (Blau)

DYND70851: Der geschlossene Rasieraufsatz für stoppelfreie Oberflächen verringert das Risiko von Verletzungen der Haut, die bei Rasieren häufig vorkommen. Kann zur Nachrasur nach dem Schnitt mit DYND70845 und DYND70850 und im Gesicht verwendet werden. (Schwarz)


ANBRINGEN/ENTFERNEN DER KLINGEN

SCHRITT Anbringen: Aufsetzen und einrasten lassen

- Nach dem Öffnen der Verpackung Beschriftung „1 Fit“ auf die „1“ auf dem Griff des Haarschneiders ausrichten und die Klinge auf den Griff aufsetzen. Danach Beschriftung „2 Click“ auf die „2“ auf dem Griff des Haarschneiders ausrichten. Die Klinge auf das Gerät drücken, bis sie hörbar einrastet.

Entfernen


Die Klinge mit Daumen und Zeigefinger in einem geeigneten Behälter entsorgen. Dazu die beiden Freigabetasten an der Seite drücken.

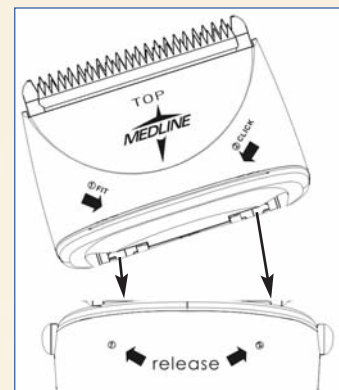

SCHNEIDEN

- Die Unterseite der Haarschneiderklinge flach auf die Haut des Patienten aufsetzen. Den Clipper auf der Haut vorsichtig gegen die Haarwuchsrichtung vorwärts schieben. Stets einen Winkel von 30-40 Grad aufrechterhalten. Nicht in einem Winkel über 40 Grad schneiden. Für optimale Leistung Haut straff ziehen.

Nach dem Schneiden verbleiben Stoppeln auf der Haut, was anzeigt, dass die Haut von der oberen Klinge nicht berührt wurde, was die Gefahr von Verletzungen und Schnitten verringert.

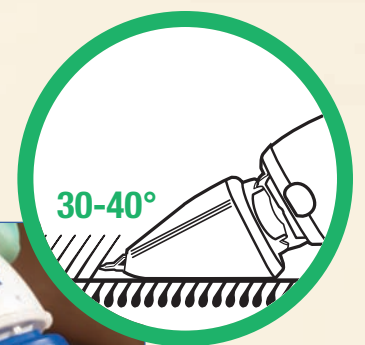

REINIGUNG

SCHRITT Abspülen

- Den Haarschneider in der Position „Aus“ unter warmes, laufendes Wasser halten. Trocken wischen.

Desinfektion

Das Haarschneidegerät kann durch Abwischen mit einem nicht korrodierenden Reinigungsmittel wie Isopropylalkohol desinfiziert werden.



LAGERUNG

SCHRITT Tischbefestigung

- Der MediClip kann in der Ladestation aufrecht auf einem Tisch oder einem Tresen aufbewahrt werden.

Wandbefestigung

Die Ladestation zur Aufbewahrung des MediClips kann mit der Wandmontageplatte und zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) auch an der Wand befestigt werden.

Warnhinweise und vollständige Gebrauchsanweisung in der Verpackung beachten.

